



# Macroplastique®

TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE  
URINAIRE D'EFFORT FÉMININE



# PRODUIT SÛR. PERFORMANCE PROUVÉE.

L'utilisation de Macroplastique dans le traitement de l'incontinence urinaire d'effort est un geste simple, qui évite les complications et la convalescence postopératoire associés aux autres traitements possibles. Si le diagnostic est correctement posé et les patientes judicieusement sélectionnées, cette méthode constitue une solution de traitement ambulatoire simple dans les indications primaires et secondaires.

## MACROPLASTIQUE® AGENT DE COMPLEMENT URETHRAL TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE D'EFFORT FÉMININE

### DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES À 1 AN<sup>1</sup>

Dans une étude multicentrique contrôlée et randomisée, le groupe Macroplastique (n=122) a présenté de meilleurs résultats que le groupe témoin traité au collagène (n=125).

- 80 % des patientes n'avaient plus de fuites ou présentaient une nette amélioration, d'après l'évaluation du médecin.
- 62 % des patientes présentaient une amélioration d'au moins 1 stade Stamey ; résultats statistiquement supérieurs aux 48 % du groupe traité par collagène ( $p < 0,05$ ).

### DES RÉSULTATS AMÉLIORÉS À 2 ANS<sup>2</sup>

Dans l'étude contrôlée et randomisée, les patientes traitées avec Macroplastique suivies pendant 2 ans (n=84) présentaient encore d'excellents résultats.

- 75 % des patientes présentaient une amélioration d'au moins 1 stade Stamey.

### DES RÉSULTATS MAINTENUS À 5 ANS<sup>3</sup>

- 83,3 % de réussite pour les cas de type I.
- 80 % de réussite pour les cas de type III.

1. Ghoniem, G., Corcos, J., Comiter, C., Bernhard, P., Westney, O.L. & Herschorn, S. (2009). Cross-linked polydimethylsiloxane injection for female stress urinary incontinence: Results of a multicenter, randomized, controlled, single-blind study. *J Urol*, 181, 204-210.


2. Uroplasty, Inc. (2006). Macroplastique Premarket Approval Study.

3. Zafirakis, H.G., Nathan, S., & Shah, J. (2002). Long-term efficacy of submucosal urethral injection for genuine stress incontinence in women. AUA abstract, Florida, USA.

4. Ghoniem, G., Bernhard, P., Corcos, J., Comiter, C., Tomera, K., Westney, O., et al. (2005). Multicenter randomized controlled trial to evaluate Macroplastique urethral bulking agent for the treatment of female stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J*, 16(Suppl2), S129-S130.

5. Chapple, C., Brubaker, L., Haab, F., Van Kerrebroeck, P., & Robinson, D. (2007). Patient-perceived outcomes in the treatment of stress urinary incontinence: Focus on urethral injection therapy. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*, 18(2), 199-205.

Voir la notice accompagnant chaque produit Macroplastique ou consulter [www.cogentixmedical.com](http://www.cogentixmedical.com) pour connaître les instructions d'utilisation et de stockage, avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi, réactions indésirables et le refus de garantie. Modèles non contractuels. Macroplastique est une marque déposée. Macroplastique est fabriqué par Uroplasty LLC. ©2019 LABORIE. Tous droits réservés.

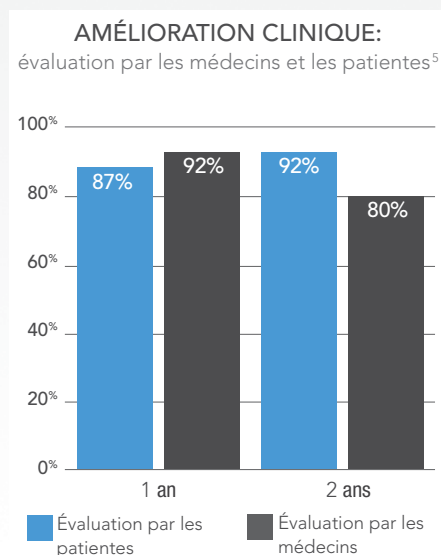

« Il est démontré que le traitement par injection urétérale apporte des améliorations de la qualité de vie statistiquement significatives et cliniquement pertinentes. De fait, l'amélioration de la qualité de vie est comparable à celle qu'apporte la chirurgie. »<sup>5</sup>

« Il est démontré que Macroplastique constitue un traitement sûr et efficace de l'incontinence urinaire d'effort féminine, avec des résultats qui se maintiennent pendant deux ans. »<sup>4</sup>



EUROPE/INTERNATIONAL:  
Tel.: +31 53 4803700  
Email: [info@laborie.com](mailto:info@laborie.com)

HEADQUARTERS:  
Tel.: +1 905 612 1170  
Email: [marketing@laborie.com](mailto:marketing@laborie.com)



[www.laborie.com](http://www.laborie.com)