

## Wirkt der Urgent PC bei mir?

Eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass bei 3 von 4 Personen mit Stuhlinkontinenz nach einer Behandlung mit Urgent PC eine Besserung eintritt.<sup>1</sup> Außerdem war eine Behandlung mit Urgent PC bei vielen Personen mit Stuhlinkontinenz erfolgreich, bei denen andere Therapien versagt hatten. Abhängig von Ihren Symptomen und der Reaktion Ihres Körpers auf Urgent PC wird Ihr Arzt entscheiden, ob Urgent PC als Einzeltherapie für Sie geeignet ist oder ob es mit einer anderen Behandlung kombiniert werden sollte.

## Wie bald werde ich eine Wirkung feststellen?

Da der Urgent PC die Signale ganz sanft beeinflusst, um die Kontrolle über den Darm zu erlangen, werden wahrscheinlich mindestens 6 Behandlungen erforderlich sein, bis Sie eine Änderung Ihrer Symptome bemerken. Die Mehrheit der Personen, bei denen diese Art der Neuromodulation eingesetzt wird, erleben eine deutliche Verbesserung ihrer Darmkontrolle. Es ist wichtig, dass Sie alle 12 Behandlungen absolviert haben, bevor Sie mit Ihrem Arzt darüber sprechen, ob diese Therapie eine angemessene Behandlung für Ihre Stuhlinkontinenz ist.



## Urgent® PC Neuromodulationssystem:

- Zur Behandlung von Stuhlinkontinenz
- Ambulante Therapie
- Höchst wirksam: Die meisten Patienten sprechen auf die Behandlung an<sup>1</sup>
- Kann erfolgreich sein, wenn andere Therapien versagt haben<sup>1</sup>
- Je nach Ansprechen auf den Urgent PC kann die Therapie nach ärztlichem Ermessen einzeln oder in Kombination mit anderen Therapien eingesetzt werden

Das Urgent® PC Neuromodulationssystem ist eine nicht medikamentöse, ambulante Therapie bei Stuhlinkontinenz. Mit dem Urgent PC-System werden auch die Symptome einer überaktiven Blase wie akuter Harndrang, erhöhte Miktionsfrequenz und Dranginkontinenz behandelt.

Sprechen Sie Ihren Arzt an, um mehr über Urgent PC und Neuromodulation zu erfahren.

1. Shafik, A., Ahmed, I., El-Sibai, O., & Mostafa, R.M. (2003). Percutaneous peripheral neuromodulation in the treatment of fecal incontinence. *Eur Surg Res*, 35, 103-107.

EUROPA/INTERNATIONAL:  
Tel.: +31 53 4803700  
Email: info@laborie.com

HAUPTSITZ:  
Tel.: +1 905 612 1170  
Email: marketing@laborie.com



[www.laborie.com](http://www.laborie.com)

Die Modelle dienen nur der Illustration. Urgent ist eine eingetragene Marke. Urgent PC wird von Uroplasty LLC hergestellt. © 2018 LABORIE. Alle Rechte vorbehalten. 25023D-DE 06/18

## Neue Hoffnung bei Problemen mit der DARMKONTROLLE



## Urgent® PC

Eine einfache, wirksame, ambulante Therapie zur Behandlung von Stuhlinkontinenz.



## Was ist Stuhlinkontinenz?

Stuhlinkontinenz ist der Verlust der bewussten Kontrolle über die Darmentleerung. In manchen Fällen verlieren Patienten nur geringe Mengen flüssigen Stuhls, in anderen Fällen kann die Entleerung festen Stuhls nicht mehr kontrolliert werden.

### Zu den Symptomen der Stuhlinkontinenz gehören:

- Weicher Stuhl oder Durchfall
- Starke, übermäßige, unkontrollierbare Darmkontraktionen, durch die der Stuhl ausgestoßen wird
- Unwillkürliche Entspannung des Schließmuskels

## Wodurch wird Stuhlinkontinenz verursacht?

Häufige Ursachen für Stuhlinkontinenz sind:

- Muskelschädigung der Schließmuskeln
- Schwächerer Muskel durch den normalen Alterungsprozess
- Nervenschädigung oder Verletzungen des Beckenbodens durch vaginale Entbindung oder Operation
- Neurologische Erkrankungen (veränderte Nervenfunktionen) wie Schlaganfall oder Diabetes
- Mit chronischer Verstopfung oder chronischem Durchfall verbundene Erkrankungen
- Reizdarmsyndrom
- Bestimmte Medikamente
- Mangelernährung

Bitte bedenken Sie auch, dass eine Veränderung Ihrer normalen Darmfunktion ein frühes Anzeichen von Krebs sein kann. Wenn Sie ständig Darmkontraktionen verspüren oder Blut im Stuhl haben, sollten Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen.

## Wie wird Stuhlinkontinenz diagnostiziert?

Um zu einer Diagnose zu kommen, wird Ihr Arzt sich Ihre Krankengeschichte anhören und eine körperliche Untersuchung vornehmen. Außerdem wird er eine oder mehrere Untersuchungen durchführen, um Ihren Afterschließmuskel und Ihren unteren Verdauungstrakt zu untersuchen.

## Welche Therapien werden am häufigsten verordnet?

- Ernährungsumstellung – Veränderung der Stuhlmenge, häufiger kleinere Mahlzeiten einnehmen, zu wechselnden Zeiten Essen und Trinken
- Bewegungstherapie – gezielte Übungen zur Verbesserung der Beckenbodenfunktion
- Medikamente – Arzneimittel gegen Durchfall und zur Darmentspannung
- Darmtraining – Biofeedback und/oder bestimmte Darmbewegungen zur Stärkung und Koordination der Muskeln
- Injizierbare Gewebekonstrukte – Vermehrung des Gewebes des Schließmuskels
- Neurostimulation – Stimulierung der Nerven, die die Darmfunktion steuern
- Operation – Implantation eines künstlichen Afterschließmuskels oder Entfernung eines Darmabschnitts

## Was ist Neurostimulation?

Die Darmfunktion wird von einer Nervengruppe geregelt, die sich am Ende der Wirbelsäule befindet und als Kreuzbeingeflecht bezeichnet wird. Eine Stimulation dieser Nerven durch leichte elektrische Impulse (Neurostimulation) kann Ihre Darmaktivität verändern. Eine Möglichkeit zur Stimulation dieser Nerven bietet Urgent PC.



## Was passiert bei der Behandlung mit Urgent PC?

Es wird vorübergehend eine feine Nadelelektrode im Bereich Ihres Innenknöchels platziert. Diese Nadelelektrode wird an einen batteriebetriebenen Stimulator angeschlossen. Nach Einschalten des Stimulators beobachtet Ihr Arzt die Reaktionen Ihres Körpers, um die ideale Impulsstärke zu bestimmen.

Jede Behandlung dauert etwa 30 Minuten. Sie werden eine erste Serie von 12 Behandlungen durchlaufen, die üblicherweise im Abstand von einer Woche durchgeführt werden. Nach diesen ersten 12 Behandlungen wird Ihr Arzt mit Ihnen ein Gespräch über Ihr Ansprechen auf die Behandlung führen und festlegen, ob weitere Behandlungen erforderlich sind, um die Wirkung zu erhalten.

## Wie fühlt sich die Stimulation mit Urgent PC an?

Die Patienten haben ganz unterschiedliche Wahrnehmungen während der Therapie mit dem Urgent PC, deswegen ist es schwer zu sagen, wie es sich für Sie anfühlen wird. Auf jeden Fall wird die Therapie mit dem Urgent PC üblicherweise gut vertragen. Der Urgent PC bietet viele verschiedene Stimulationsstärken, sodass Ihr Arzt die Behandlung auf Ihre Bedürfnisse einstellen und während der Therapie auf Beschwerden reagieren kann, die Sie eventuell verspüren.

