


Suchen Sie nach einer
Alternative zur Behandlung
einer wiederkehrenden
anterioren Harnröhrenstriktur?

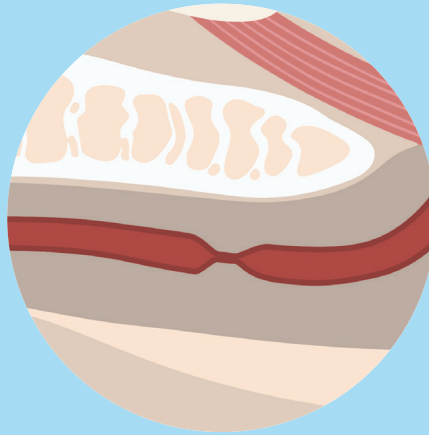

Was ist eine rezidivierende anteriore Harnröhrenstriktur?

Unter einer rezidivierenden bulbären Harnröhrenstriktur wird eine narbige Verengung der Harnröhre verstanden, die den Urinfluss behindert. Bleibt sie unbehandelt, kann die Verengung zu einer verminderten Lebensqualität, zu Blasen- und Nierenschäden sowie zu Harnwegsinfektionen bei Männern führen.²

Häufige Symptome sind:

- Zögerlicher Beginn des Urinstrahls
- Schwacher oder unregelmäßiger Strahl
- Starker Harndrang
- Schmerzen beim Wasserlassen
- Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung
- Nachtröpfeln

Endlich der Durchbruch für die Behandlung von Harnröhrenstrikturen


Die derzeitige gängige Praxis der endoskopischen Behandlung der anterioren Harnröhrenstriktur ist oft unwirksam, was zu mehrfach wiederholten Eingriffen mit abnehmenden Ergebnissen führt.¹ Optilume® ist eine wirksame Alternative zu herkömmlichen endoskopischen Strikturbehandlungen und bietet minimalinvasive, sofortige Linderung.³ Optilume® wirkt, indem das Wachstum neuen Narbengewebes gehemmt wird, das nach Dilatationen oder direkter visueller interner Urethrotomie (DVIU) häufig wiederkehrt.

**Und das alles in einem einfachen,
ambulantem Verfahren.**




Was ist Optilume® und wie wird es verwendet?


- Optilume® ist ein kleiner, zylindrischer, medikamentbeschichteter Ballon, der gleichzeitig die Harnröhre öffnen und das Auftreten von neuem Narbengewebe verlangsamen oder stoppen soll
- Ähnliche Ballons verhindern seit mehreren Jahren erfolgreich eine erneute Behandlung bei kardiovaskulären Eingriffen³
- Schonender Eingriff³
- Keine Auswirkungen auf die erektile Funktion³

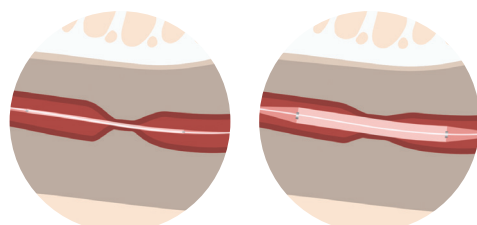


Einführen

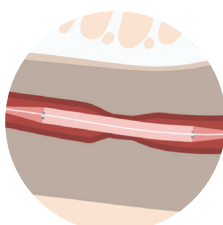

Erweiterung

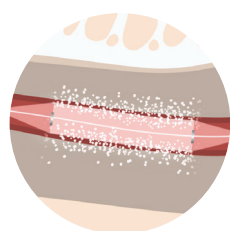

Freisetzung des
Medikaments

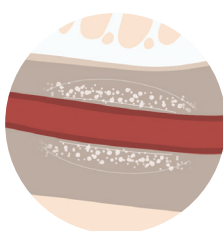


Dauerhaftigkeit³

Nachgewiesene Ergebnisse

- Paclitaxel, der Wirkstoff, mit dem der Ballon beschichtet ist, ist ein bewährtes, die Gewebevermehrung hemmendes Medikament, das seit Anfang der 1990er Jahre bei Millionen von Patienten weltweit in verschiedenen Anwendungen wirksam eingesetzt wurde

Rezidivfreiheit (FFRI) nach 5 Jahren⁴

73%

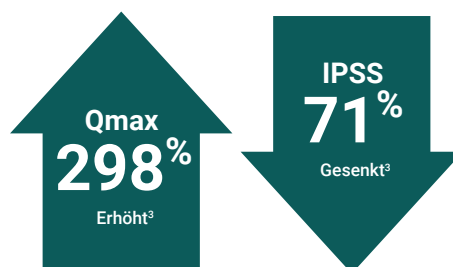

▲ Andauernde Wirksamkeit nach 5 Jahren mit **73% FFRI**, einem **Anstieg von 298% des Qmax** und einem **Rückgang des IPSS von 71%**.

Einfach. Sicher. Dauerhaft.
Dies ändert alles

Fragen Sie Ihren Urologen,
ob Optilume® zur Behandlung
Ihrer rezidivierenden anterioren
Harnröhrenstriktur geeignet ist.

Erfahren Sie mehr unter www.optilume.com

1 Steenkamp JW, Heyns CF, de Kock MLS. Internal Urethrotomy Versus Dilation as Treatment for Male Urethral Strictures: A Prospective, Randomized Comparison. Journal of Urology, Vol. 157:96-101. January 1997

2 Tritschler S, Roosen A, Füllhase C, Stief CG, Rübbers H. Urethral stricture: etiology, investigation and treatments. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(13):220-226. doi:10.3238/arztebl.2013.0220

3 Data on file. DSC016-004 rJ Robust I Clinical Study Final Report

4 Data on file. RP1277-001 rB



Dieses Dokument ist ausschließlich zur Verwendung in der Europäischen Union bestimmt.

©2024 Laborie. Alle Rechte vorbehalten.

Laborie¹

DE & AT	CH
T +49 2041 55 80 10 (DE)	T +41 (0) 319112811
T 0800 500158 (AT)	E swissorders@laborie.com
E diagnostik@laborie.com	W laborie.com
W laborie.com	



Mehr erfahren

MKT-01039 | A |