




1 Manuelle Retraktion

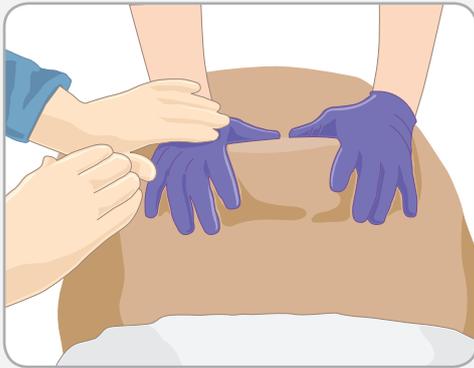


Die Bauchdecke manuell zurückziehen, um die Eingriffsstelle freizulegen.

2 Lasche „A“ entfernen



Lasche „A“ entfernen.

3 Positionieren und Anbringen

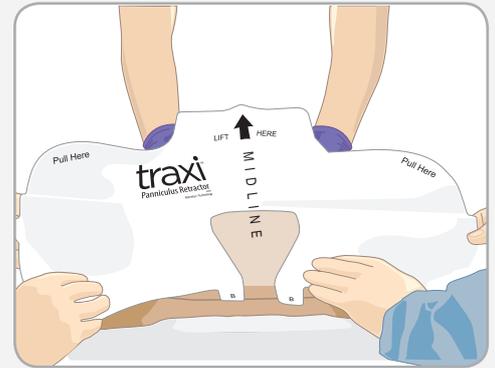

Den Retraktor 5 cm über der Inzisionslinie positionieren. An der Mittellinie ausrichten, auf die Patientin legen.


4 Trägerfolie „B“ entfernen



HINWEIS: Folienträger nach unten wegziehen.


Die Trägerfolie „B“ entfernen und dabei die Folie über der Patientin gespannt halten.

5 Spannen und Anbringen

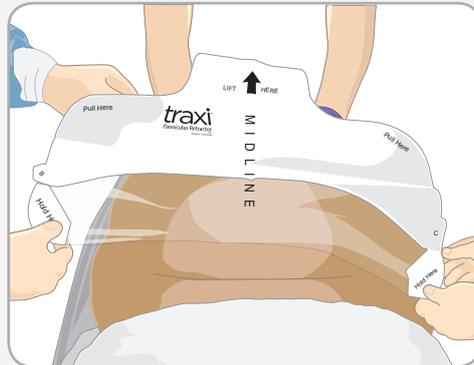


Beim Glattstreichen auf der Haut der Patientin gespannt halten, von der Mittellinie nach außen.

6 Trägerfolie „C“ entfernen

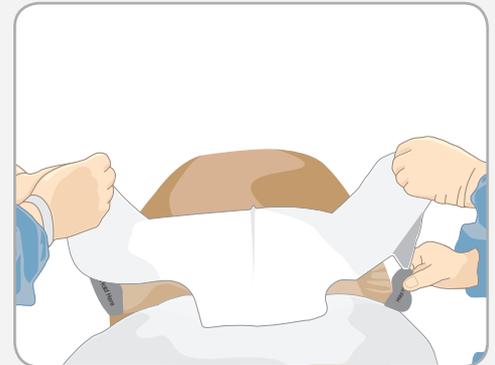


Vorrichtung zurückklappen, um den Pannikus in seine natürliche Position zurückfallen zu lassen. Trägerfolie „C“ durch gleichzeitiges Ziehen der Laschen „C“ entfernen.

7 Spannen, Heben, Ziehen

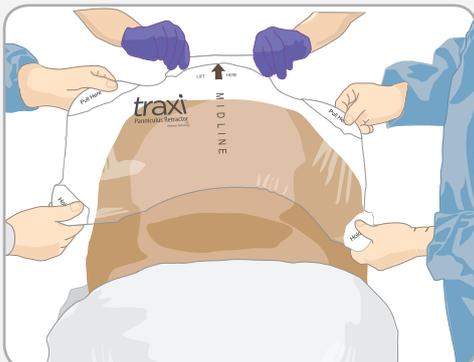

Gemeinsam den Retraktor unter Spannung anheben und kopfwärts ziehen, dann am Xiphoid befestigen.

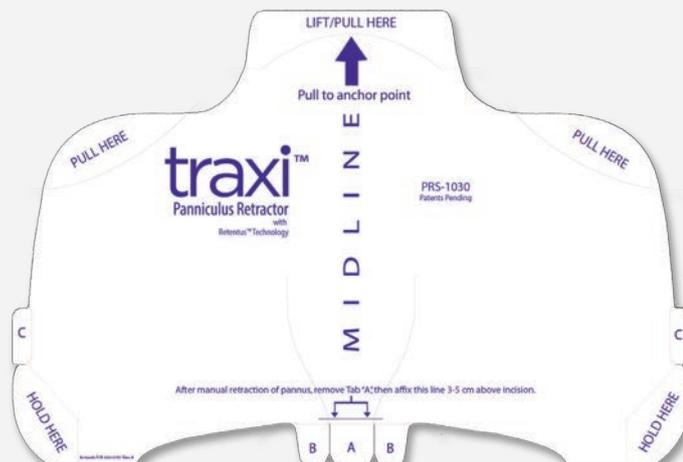

Kurzanleitung – traxi-Extender




1 traxi anbringen




traxi-Retraktor anbringen. Bei nicht ausreichender Retraktion kann der Extender genutzt werden.

2 Befestigungspunkt erweitern

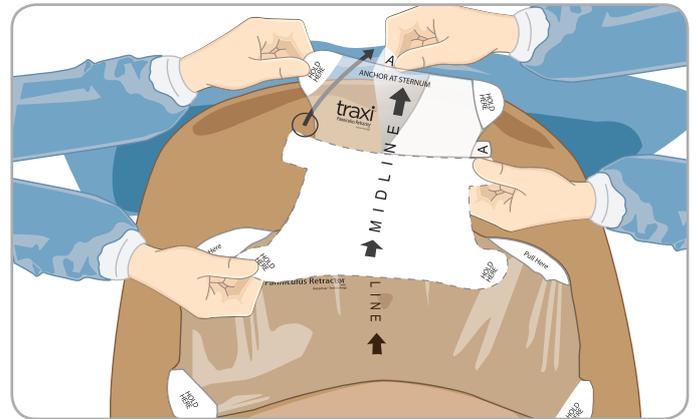


Trägerfolie „A“ entfernen, indem gleichzeitig von jeder Seite an den Laschen „A“ gezogen wird. Am Brustbein zwischen den Brüsten anbringen, nahe der Mittellinie des Schwertfortsatzes – auf der Haut glattstreichen.

3 Trägerfolie „B“ entfernen

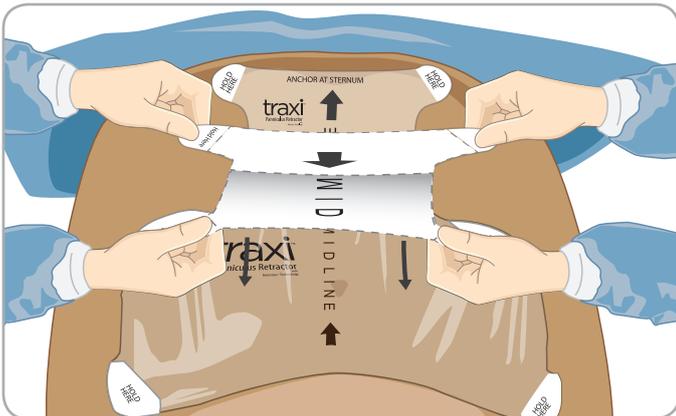


Trägerfolie „B“ entfernen, indem gleichzeitig von jeder Seite an den Laschen „A“ gezogen wird. Vorbereitung zum Überlappen und Anbringen am traxi (**noch nicht anbringen**).

4 Sekundäre Retraktion

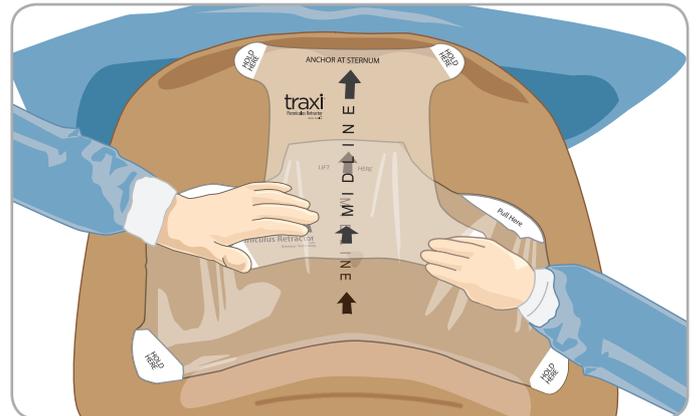

Die Bauchdecke vor Anbringen des Extenders nach oben schieben (Richtung Kopf der Patientin). Die Bauchdecke festhalten und den Extender auf dem traxi hin zum Nabel glattstreichen.

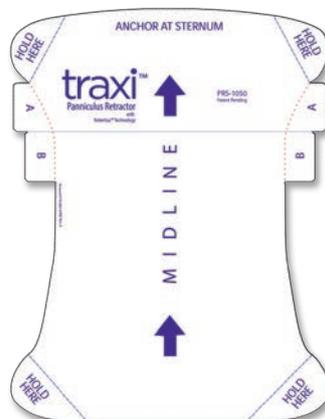

Siehe Packungsbeilage für vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Ihr Ansprechpartner:

clinicalinnovations.de

Clinical Innovations Germany GmbH
Werner-von-Braun-Str. 10a
85640 Putzbrunn
Telefon 089 625 67 54 | Fax 089 625 65 54

