

# Intelligent Cath-ID System

Kurzanleitung (Nexam & Solar Blue)

UROLOGIE & UROGYNÄKOLOGIE  
Konnektieren von Katheter und  
Pumpenschläuchen mit Laborie  
Urodynamik Geräten



Part Number: CATW1A212BL  
Lot Number: 1011  
Number of items: 25

1. Jede Katheter- und Pumpenschlauchverpackung verfügt über einen RFID-Tag, der die Artikelnummer, die Anzahl der jeweiligen Verbrauchsmaterialien sowie das Ablaufdatum enthält.

Consumables traceability


Consumables selected

|                    |              |              |                        |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | Lot Nr 00001 | Expiry Date 01/06/2022 |
| Pump tube          | TUB500       | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 |

Repository available


| Consumable         | Part Nr      | Expiry Date | Lot Nr | Count |        |
|--------------------|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | 01/06/2022  | 00002  | 10    | Delete |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | 01/06/2022  | 00001  | 10    | Delete |
| Pump tube          | TUB500       | 01/06/2022  | 00002  | 10    | Delete |

3. Das System erkennt die Verbrauchsmaterialien und fügt sie automatisch dem digitalen Inventar der Software hinzu.

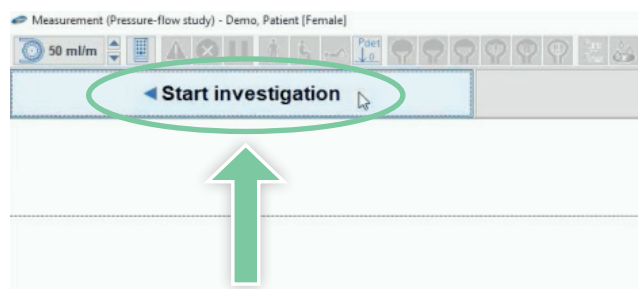

5. Wurden die Verbrauchsmaterialien gescannt oder aus dem gescannten Inventar ausgewählt, können Sie die Untersuchung durchführen.

Wurde die Untersuchung gestartet, aktiviert dies ein 2-stündiges Zeitfenster, um diese durchzuführen.

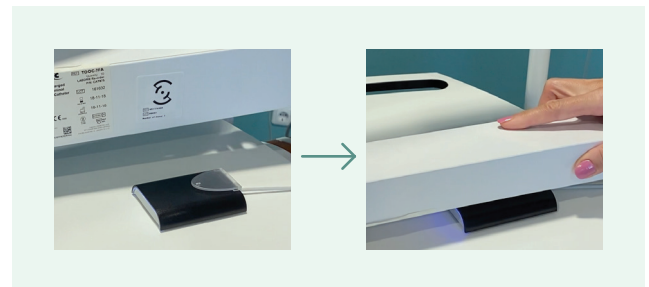

2. Katheter und Pumpenschläuche müssen vor der Untersuchung gescannt werden.

Consumables traceability

Consumables selected

|                    |              |              |                        |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | Lot Nr 00001 | Expiry Date 01/06/2022 |
| Pump tube          | TUB500       | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 |

Repository available

| Consumable         | Part Nr      | Expiry Date | Lot Nr | Count |        |
|--------------------|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | 01/06/2022  | 00002  | 10    | Delete |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | 01/06/2022  | 00001  | 10    | Delete |
| Pump tube          | TUB500       | 01/06/2022  | 00002  | 10    | Delete |

4. Um eine neue Untersuchung zu starten, wählen Sie die Katheter und Schläuche im Drop-down-Menü aus dem verfügbaren Inventar aus.

Consumables traceability

Consumables selected

|                    |              |              |                                |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 (reuse) |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | Lot Nr 00001 | Expiry Date 01/06/2022 (reuse) |
| Pump tube          | TUB500       | Lot Nr 00002 | Expiry Date 01/06/2022 (reuse) |

Repository

| Consumable         | Part Nr      | Expiry Date | Lot Nr | Count |        |
|--------------------|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| Bladder catheter   | MMS U-7390.1 | 01/06/2022  | 00002  | 2     | Delete |
| Abdominal catheter | 902IP4522    | 01/06/2022  | 00001  | 2     | Delete |
| Pump tube          | TUB500       | 01/06/2022  | 00002  | 12    | Delete |

6. Mit den gleichen Verbrauchsmaterialien können innerhalb dieses 2-stündigen Zeitfensters mehrere Untersuchungen am gleichen Patienten durchgeführt werden.

Consumables traceability

Consumables selected

Bladder catheter MMS U-73901 Lot Nr 00002 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)

Abdominal catheter 902IP4522 Lot Nr 00001 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)

Pump tube TUB500 Lot Nr 00002 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)

Repository

| Consumable         | Part Nr     | Expiry Date | Lot Nr | Count |        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| Bladder catheter   | MMS U-73901 | 01/06/2022  | 00002  | 2     | Delete |
| Abdominal catheter | 902IP4522   | 01/06/2022  | 00001  | 2     | Delete |
| Pump tube          | TUB500      | 01/06/2022  | 00002  | 12    | Delete |

7. Nach der Untersuchung werden die verwendeten Verbrauchsmaterialien automatisch aus dem gescannten Inventar entfernt.

Consumables traceability

Consumables selected

Bladder catheter MMS U-73901 Lot Nr 00002 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)


Abdominal catheter 902IP4522 Lot Nr 00001 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)

Pump tube TUB500 Lot Nr 00002 Expiry Date 01/06/2022 (reuse)

Repository

| Consumable         | Part Nr     | Expiry Date | Lot Nr | Count |        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| Bladder catheter   | MMS U-73901 | 01/06/2022  | 00002  | 2     | Delete |
| Abdominal catheter | 902IP4522   | 01/06/2022  | 00001  | 2     | Delete |
| Pump tube          | TUB500      | 01/06/2022  | 00002  | 12    | Delete |

8. Das System erkennt abgelaufene Materialien und entfernt diese aus dem Inventar. Die Software zeigt einen Monat vor Ablauf dieser Materialien eine Warnmeldung an.

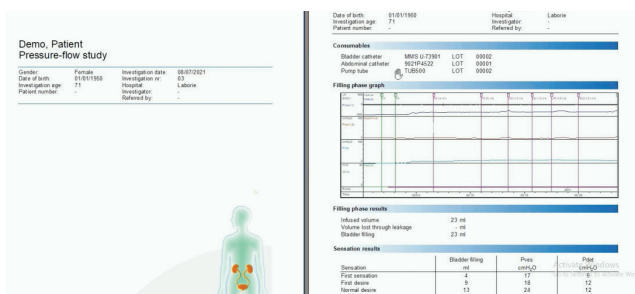

9. Die verwendeten Verbrauchsmaterialien werden im Untersuchungsbericht aufgelistet.

Consumables traceability

Consumables selected

Bladder catheter none (bypass)

Abdominal catheter none (bypass)

Pump tube Scan label

Repository available

| Consumable         | Part Nr       | Expiry Date | Lot Nr | Count |
|--------------------|---------------|-------------|--------|-------|
| Bladder catheter   | none (bypass) |             |        |       |
| Abdominal catheter | none (bypass) |             |        |       |
| Pump tube          | Scan label    |             |        |       |

10. Über Bypässe kann die Untersuchung auch dann durchgeführt werden, wenn es ein Problem mit dem RFID-Tagscanner gibt.

Scan log

| Time     | Information                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11:51:35 | 10 consumables successfully added Part Nr MMS U-73901, Lot Nr 00002, Expiry Date 01/06/2022 |
| 11:51:41 | 10 consumables successfully added Part Nr 902IP4522, Lot Nr 00001, Expiry Date 01/06/2022   |
| 11:51:45 | 10 consumables successfully added Part Nr TUB500, Lot Nr 00002, Expiry Date 01/06/2022      |
| 11:51:53 | 10 bypasses successfully added.                                                             |

Add bypasses

Connected to RFID reader Bypasses available: 10 PatID: 005039 InvID: 100503

11. Zu Beginn sind im System einige Bypässe verfügbar; nach jeweils 10 Untersuchungen kommt ein Bypass hinzu.

Add bypasses

LABORIE

Serial number

Transaction code 254934

Please enter the Response code here

OK Cancel

12. Sind keine Bypässe mehr verfügbar, können via Laborie-Helpdesk weitere Bypässe angefragt werden. Der erhaltene Response Code muss anschließend in der Software eingegeben werden.

Einige Produkte von Laborie sind nicht in allen Regionen verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Sales Mitarbeiter für mehr Informationen bezüglich der Verfügbarkeit von Produkten in Ihrer Region.

© 2022 Laborie. Alle Rechte Vorbehalten.

Laborie<sup>1</sup>

DE & AT

T +49 2041 55 80 10 (DE)  
T 0800 500158 (AT)  
E diagnostik@laborie.com  
W laborie.com

CH

T +41 (0) 319112811  
E swissorders@laborie.com  
W laborie.com



Video-Kurzanleitung



Mehr Infos

MKT-00558 [A]