

babyLance™

La lancette de sécurité

OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE & NÉONATAL


Lancette de sécurité à usage unique qui offre une incision douce et précise pour les prises de sang de vos patients les plus précieux.

Conçue pour les infirmières de néonatalogie... par des infirmières de néonatalogie!!

La lancette de prélèvement au talon babyLance™ a acquis une popularité mondiale grâce à son incision douce et précise, sa facilité d'utilisation et ses caractéristiques de sécurité.



Comparaison du profil d'incision des lancettes de prélèvement au talon chez le nourrisson

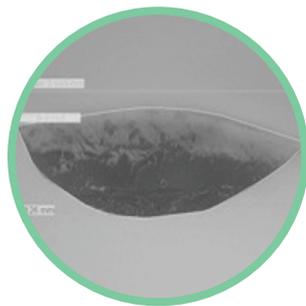

▼ **ITC Tenderfoot™¹**

Le profil de coupe de la lancette Tenderfoot d'ITC présente une incision à plusieurs angles et un motif en forme de « W » irrégulier et inégal. (Marque commerciale d'International Technidyne Company)

▼ **Cardinal gentleheel™²**




Le profil de la lancette Gentleheel de Cardinal Health présente une incision à perforation initiale angulaire, suivie d'un arc de plus en plus profond. (Marque commerciale de Cardinal Health, Inc.)

▼ **BD Quickheel™³**

Le profil de coupe de la lancette Quikheel de BD présente une perforation initiale émoussée, suivie d'une action tranchante. (Marque commerciale de Becton, Dickinson and Company)

▲ **babyLance™**

Le profil de coupe de la lancette babyLance présente une incision légèrement incurvée, sans marque de perforation émoussée ni de coupe inégale ou irrégulière.

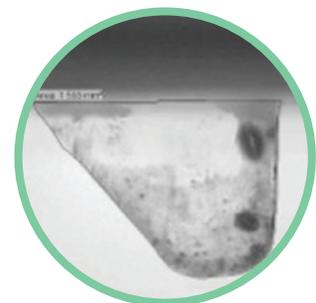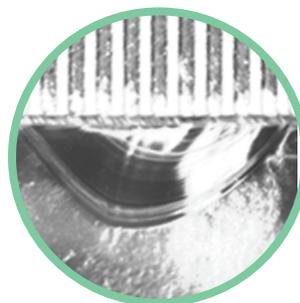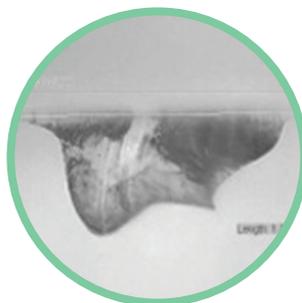

Étude comparative du profil d'incision Heelstick d'août 2012 (Rév. 1). L'échelle des profils d'incision a été augmentée à des fins de démonstration uniquement.

Différentes tailles disponibles

Une gamme complète de profondeurs d'incision conçues pour fournir une quantité optimale de sang capillaire avec un traumatisme minimal.

La sécurité avant tout

Réduit les piqûres et coupures accidentelles grâce à sa lame intégrée qui se rétracte automatiquement après utilisation.

Traumatisme réduit

La lancette babyLance est conforme aux directives CLSI-LA4-A5, assurant une incision incurvée en douceur pour limiter le traumatisme causé au bébé.

Haute précision


Une gâchette facile à activer, des repères d'incision et des fossettes de préhension empêchent la lancette de glisser de la main.

babyLance™ Mode d'emploi

1. Sélectionner

Sélectionnez le site de ponction au niveau des faces latérales du talon, en prenant soin d'éviter le calcaneum. Nettoyez la zone de ponction du talon avec une lingette antiseptique. Laissez sécher la peau.

Conseil : Consultez le tableau de dimensionnement (ci-dessous à gauche)

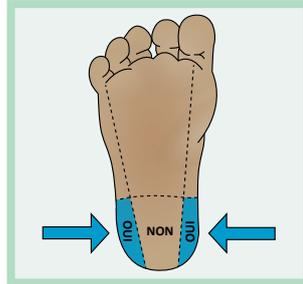

3. Placer

Placez l'encoche de la lame contre le talon avec la gâchette dans la direction opposée à l'utilisateur. Tirez sur la gâchette avec l'index.

Conseil : Placez la lancette à plat sur le site de ponction. Aucune force descendante n'est requise. Ne balancez pas le dispositif lors de l'activation de la gâchette.



Voir le mode d'emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les précautions et les contre-indications

Informations sur l'incision

Le ressort interne exclusif de la lancette babyLance active le mouvement de balancier de la lame, ce qui garantit une incision tout en douceur conforme aux directives CLSI LA4-A5 pour réduire les traumatismes des tissus sous-cutanés délicats des nourrissons.


Color du produit	Référence	Indication*	Longueur d'incision ¹	Profondeur d'incision ²
Jaune ●	BLM	Moins de 1000 g Grand prématuré	2.2 mm	0.60 mm
Rose ●	BLP	1000 à 2500 g Prématuré	3.0 mm	0.85 mm
Bleu ●	BLN	2500 g à 9 kg Naissance - 6 mois	3.0 mm	1.0 mm

Brevet américain 8,715,307 *Recommandation uniquement, faire appel au jugement clinique.

Mesurer l'incision

L'incision légèrement incurvée (ligne pointillée blanche) est mesurée par la longueur maximale et la profondeur maximale.

- Largeur de la lame 3,0 mm (±0,5 mm)
- Épaisseur de la lame 0,15 mm (±0,2 mm)

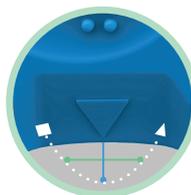

© 2023 Laborie. Tous droits réservés.

Laborie¹

FRANCE

T +33 1 79 75 03 03


W fr.laborie.com

E advfrance@laborie.com

2. Casser

Cassez le verrou du cran de sécurité. Ne tirez sur la gâchette que lorsque le système est prêt à l'emploi.



Conseil : Le cran de sécurité peut être retiré par torsion - ne tirez pas

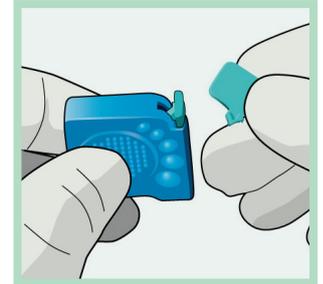

4. Essuyer

Essuyez la première goutte de sang. Recueillez la quantité de sang désirée. Mettez babyLance au rebut selon les recommandations établies.

Conseil : Il est déconseillé de presser le talon

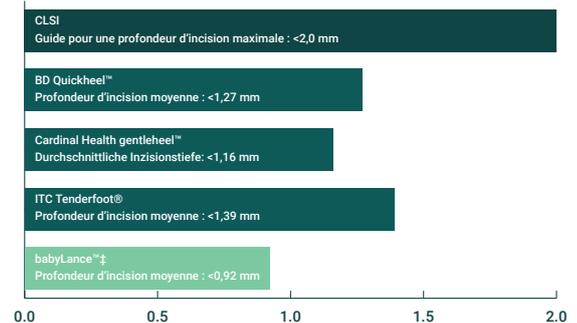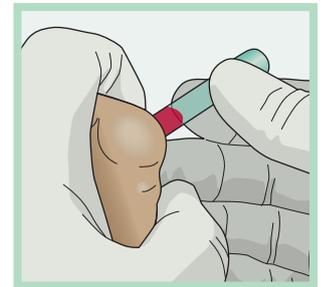

▲ ‡ White Paper: Safe in Common's "10 Golden Rules of Safety" / Données internes, Juillet 2012



En savoir plus