

## ABBy<sup>TM</sup>

### Kurzanleitung

GEBURTSHILFE, GYNÄKOLOGIE UND NEONATOLOGIE


Nach operativen abdominalen Eingriffen hält ABBy die Inzisionsstelle durch Retraktion des Panniculus frei.

#### 1. Vorbereitung



Die Patientin befindet sich in Rückenlage und hält den Panniculus hoch.

#### 2. Lasche A entfernen

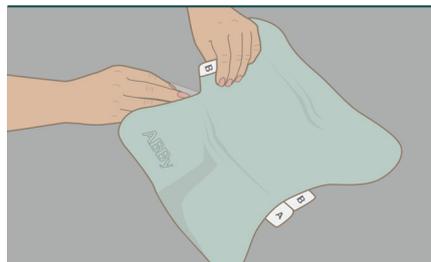

Platzieren Sie Ihre Finger an den beiden oberen Ecken, während sich die Patientin in liegender/zurückgelehnter Position befindet und entfernen Sie Lasche A.

#### 3. Positionieren und anbringen



Richten Sie die Unterseite von Teil 'A' 3-5 cm über der Inzision aus. Kleben Sie Teil 'A' fest und streichen Sie ihn glatt.

#### 4. Lasche B entfernen



Legen Sie an den oberen Ecken Ihre Finger auf die Außenseite und Ihre Daumen auf die adhäsive Silikon-Innenseite des ABBy. Entfernen Sie Lasche B.

#### 5. Retraktion des Panniculus



ABBy unter Spannung anheben und kopfwärts ziehen, dann die obere Kante von Teil 'B' am Xiphoid befestigen.

#### 6. Anwendung abschließen



Achten Sie darauf, dass der Retraktor keine Falten wirft und glätten Sie ABBy vollständig bis auf die Haut.

Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2023 Laborie. Alle Rechte vorbehalten.

**ABBy<sup>TM</sup>**  
Postoperativer Panniculus-Retraktor

