

ABByTM

Guide de référence rapide

OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE ET
NÉONATALOGIE


L'ABBy rétracte le pannicule hors du site d'incision après une intervention chirurgicale dans la partie inférieure de l'abdomen.

1. Préparation



La patiente est en position de décubitus dorsal ou allongée et maintient le tablier abdominal.

2. Retrait de la patte « A »

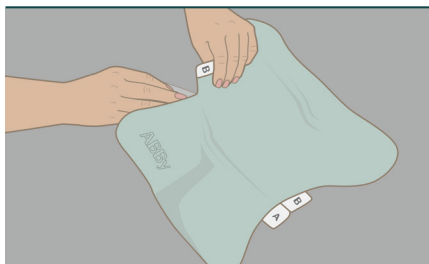


Pendant que vous êtes en position horizontale ou inclinée, saisissez chaque coin supérieur.

3. Positionnement et application de la patte A




Aligner et coller la partie inférieure de l'ABBy 3 à 5 cm au-dessus de l'incision. Lisser le panneau A sur la peau.

4. Retrait de la patte B

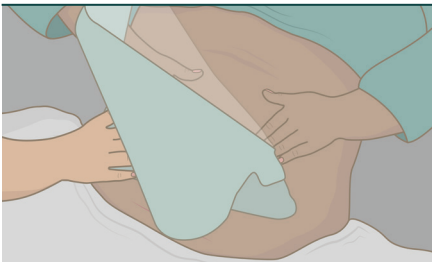

Au niveau des coins supérieurs, placer les doigts sur le côté extérieur et les pouces sur le côté adhésif silicone intérieur de l'ABBy.

5. Rétraction et application de la patte B

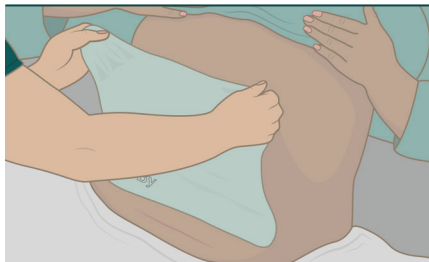

Tout en maintenant l'ABBy par ses coins supérieurs, tirer doucement vers la tête et fixer le bord supérieur sous le sternum.

6. Fin de l'application



Veiller à ce que le rétracteur ne présente aucun pli et lisser intégralement l'ABBy sur la peau.

Voir le mode d'emploi pour les instructions complètes, les mises en garde, les précautions et les contre-indications.

© 2023 Laborie. Tous droits réservés.

ABByTM
Rétracteur de pannicule post-opératoire

