


# ClearView<sup>®</sup>

## Kurzanleitung

GEBURTSHILFE, GYNÄKOLOGIE & NEONATOLOGIE

Uterusmanipulation, die eine klare Sicht ermöglicht, während die Patientin in Rückenlage bleiben kann.

### 1. Produkt überprüfen

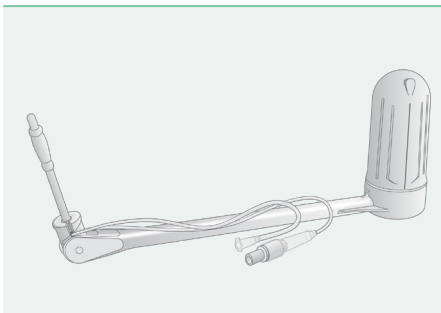


Unversehrtheit der sterilen Verpackung überprüfen. Flüssigkeit (max. 10 ml) einfüllen, um den Spitzenballon zu überprüfen, dann Flüssigkeit entfernen.

### 4. Produkt einführen



Die distale Spitze mit Gleitmittel versehen und in die Uterushöhle einführen, bis der Abstandhalter am äußeren Muttermund anliegt.

### 7. Entfernen und entsorgen

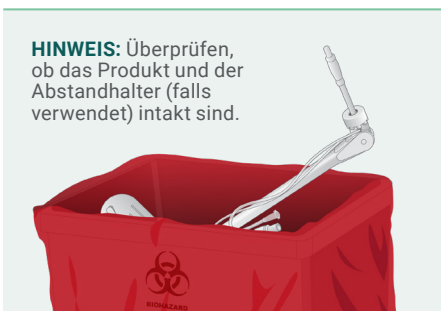


Die Flüssigkeit aus dem Spitzenballon entfernen, den Uterus in seine natürliche Position zurückbringen, das Produkt entfernen und entsorgen.

### 2. Uterus mit Ultraschall vermessen




Uteruslänge bestimmen, Produkt mit geeigneter Größe auswählen.

### 5. Spitzenballon befüllen

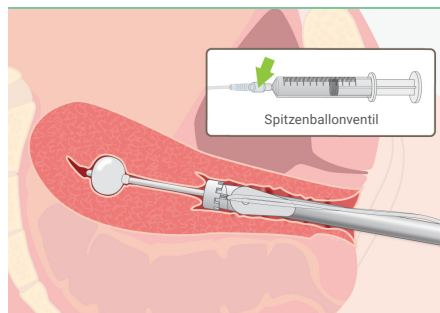

Langsam Flüssigkeit (max. 10 ml) in den Spitzenballon einfüllen, bis das Produkt fest gegen die Zervix gezogen wird.


### 3. Abstandhalter anbringen\*

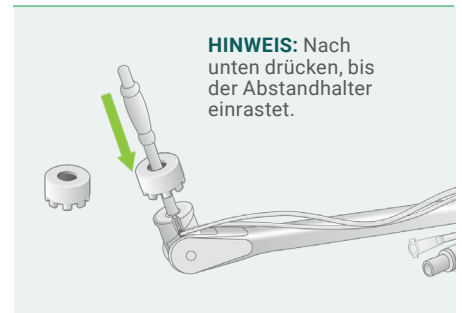

Bei Bedarf den 1-cm-Abstandhalter anbringen.

**\*Der Abstandhalter ist optional**

### 6. Steuergriff drehen

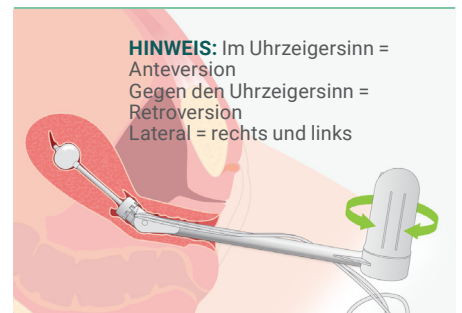

Den Steuergriff drehen, um den Uterus zu manipulieren.



Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen

# ClearView<sup>®</sup> Total

## Kurzanleitung


### 1. Produkt überprüfen

### 2. Uterus mit Ultraschall vermessen

Schritte **1** und **2** entsprechen der Clearview-Kurzanleitung


### 5. Produkt einführen

**HINWEIS:** Die Zervix muss vor der Einführung auf 5,5 mm dilatiert werden. Zum Einführen können vaginale Retraktoren, ein Spekulum oder eine Repositionszange verwendet werden.

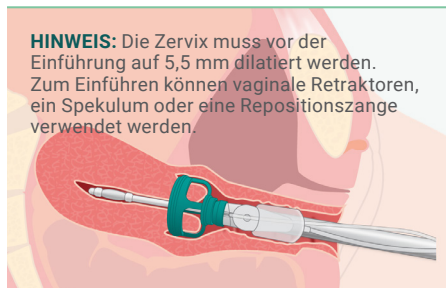

Die distale Spitze mit Gleitmittel versehen und in die Uterushöhle einführen, bis die Cup am äußeren Muttermund anliegt.

### 8. Okkluder befüllen

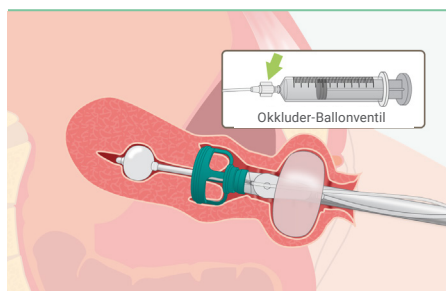

Vor der Kolpotomieinzision den Okkluder-Ballon in die Vagina vorschieben. Befüllen (60 bis 120 ml Flüssigkeit).


### 3. Abstandhalter anbringen\*



**HINWEIS:** Über die Nut nach unten schieben, dann im Uhrzeigersinn drehen, um ihn einzurasten.


\*Bei Bedarf den 1-cm-Abstandhalter anbringen.

### 6. Spitzenballon befüllen

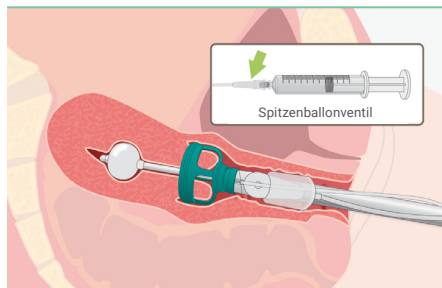


Langsam Flüssigkeit (max. 10 ml) in den Spitzenballon einfüllen, bis das Produkt fest gegen die Zervix gezogen wird.

### 9. Uterusinzision

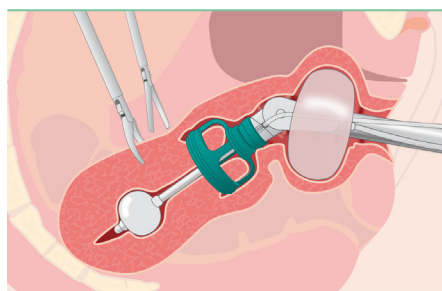

Die Uterusinzision vornehmen. Die Cup als **Sichtführung** zur Gewebedarstellung verwenden. Die Cup **nicht** als Ablage für das Instrument verwenden.


### 4. Kolpotomiecup anbringen

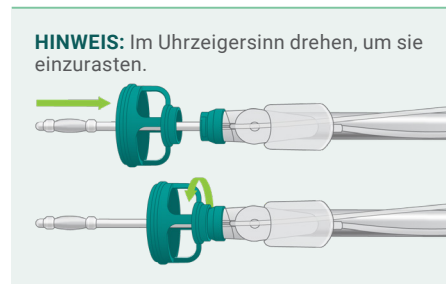

**HINWEIS:** Im Uhrzeigersinn drehen, um sie einzurasten.

Die richtige Cupgröße auswählen und die Cup am Abstandhalter oder an der Spitzenhalterung anbringen.


### 7. Steuergriff drehen

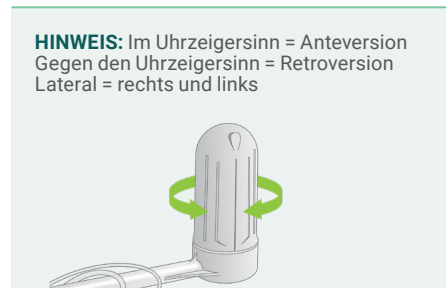

**HINWEIS:** Im Uhrzeigersinn = Anteversion  
Gegen den Uhrzeigersinn = Retroversion  
Lateral = rechts und links

Den Steuergriff drehen, um den Uterus zu manipulieren.

### 10. Entfernen und entsorgen

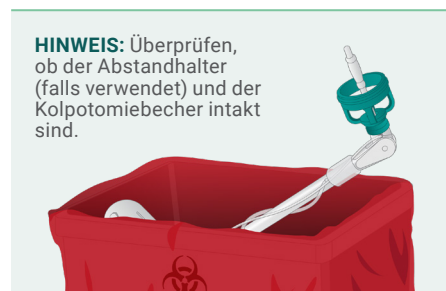

**HINWEIS:** Überprüfen, ob der Abstandhalter (falls verwendet) und der Kolpotomiebecher intakt sind.

Die Flüssigkeit aus dem Spitzenballon entfernen, den Uterus in seine natürliche Position zurückbringen, das Produkt entfernen und entsorgen.

**Vollständige Anweisungen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen**

© 2023 Laborie. Alle Rechte vorbehalten.

**Laborie**<sup>1</sup>

GERMANY / AUSTRIA

T +49 2041 55 80 10 (DE)

W de.laborie.com

T 0800 500 158 (AT)



Mehr infos